



1

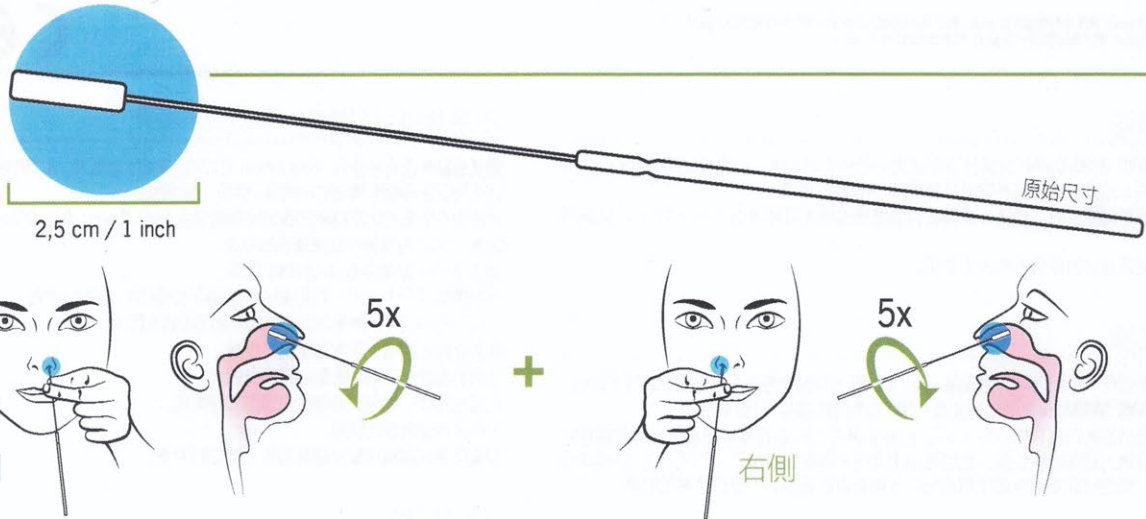

小心將測試拭子插入鼻孔約2.5厘米深-對於兒童青少年而言，插入至感覺到輕微阻力為止。將測試拭子沿鼻孔壁打5個大圈。用同一拭子在另一側鼻孔裡重複同樣步驟。

2

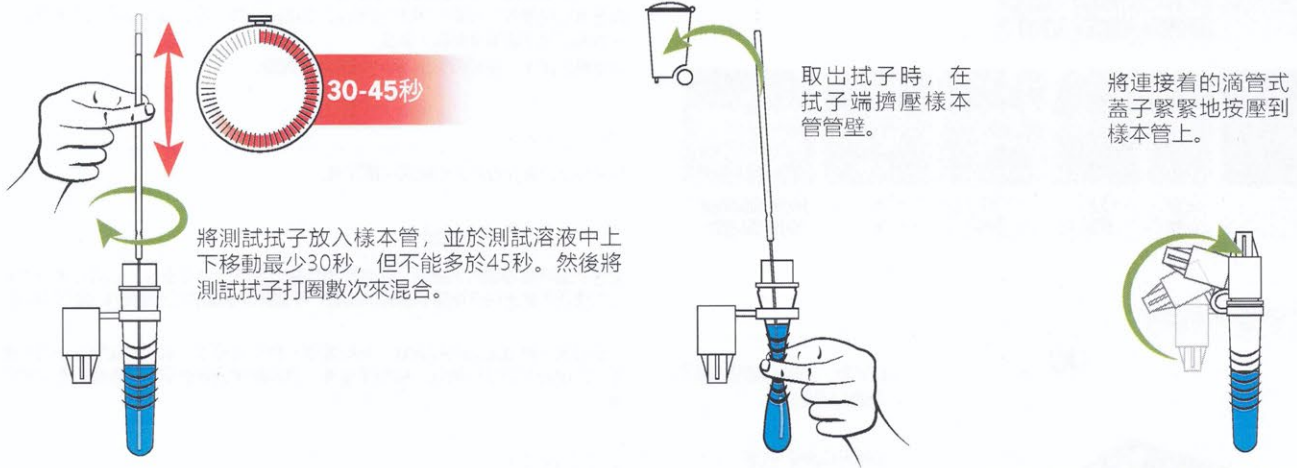


將測試拭子放入樣本管，並於測試溶液中上下移動最少30秒，但不能多於45秒。然後將測試拭子打圈數次來混合。

取出拭子時，在拭子端擠壓樣本管管壁。

將連接着的滴管式蓋子緊緊地按壓到樣本管上。

3

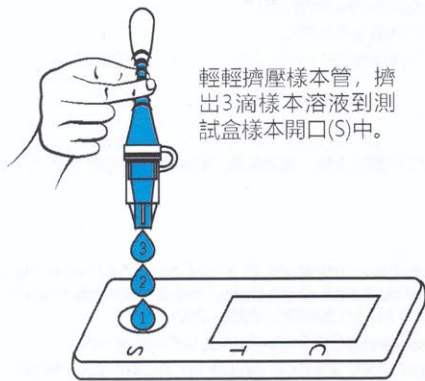



輕輕擠壓樣本管，擠出3滴樣本溶液到測試盒樣本開口(S)中。



加入樣本後等候15分鐘以取得結果。此時，請勿觸碰測試裝置。

4

15分鐘等候時間結束後，須於5分鐘內檢查結果。若超過20分鐘讀取結果，結果可能會變得不準確。

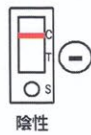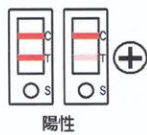

**測試線強度**  
只要測驗線能被清楚地識別，無論深色或淺色的測試線都應該被認為有效的。

**如果您的結果無效**  
如果您得到無效的結果，請用新的測試套裝重新檢測。

**如果您的結果是陽性**  
陽性結果必須立即跟據當地指引向相關衛生部門報告。陽性結果必須由註冊醫生盡快進行PCR檢查來確認，您和您的家人應根據當地指引自我隔離直到取得測試的結果。